
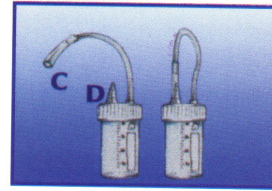
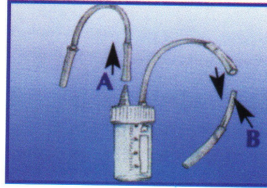


BRONKOSKOPI LAVAJ TOPLAMA KABI
(40 - 100 - 175 ml.)
KULLANMA KILAVUZU

- 1) İşleme başlamadan önce
1 nolu çıkışı fiberoskopa
2 nolu çıkışı aspirasyona bağlayınız.
- 2) İşlemden sonra
A ve B hortumlarını çıkarınız.
Flakonu serbestleştiriniz.
Hortumları şemada gösterildiği gibi (C ve D uçlarını)birleştirerek laboratuvara gönderiniz.

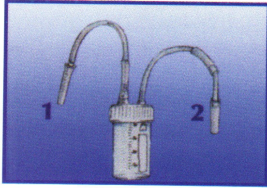

İthalatçı Firma:

Naz Medikal Özel Sağlık Hiz. Ve Ür. San. Tic. Ltd. Şti
Söğütluçeşme Cad. Bayrak Apt. No:146 Kat:2 Da:6 Kadıköy/İstanbul
Tel:0216 414 36 30 Faks: 0216 345 52 67
naz@nazmedikal.com.tr www.nazmedikal.com.tr