

Med2000

LEONARDO

ULTRASONİK NEBÜLİZATÖR CİHAZI

KULLANIM KILAVUZU

İTHALATÇI FİRMA: NAZ MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ
SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

ADRES: SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. BAYRAK APT. NO:146/6 KADIKÖY/İSTANBUL


TEL: 0216 336 94 72

FAX: 0216 345 52 67

naz@nazmedikal.com.tr

www.nazmedikal.com.tr

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ

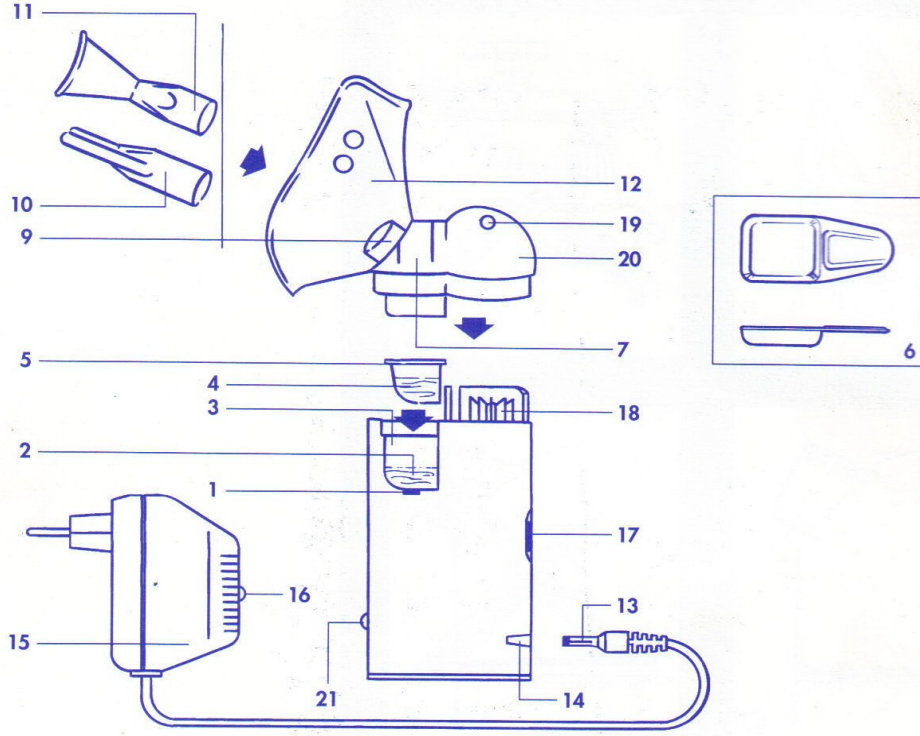

Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

KULLANIM

- _ Cihazın üstünde bulunan mavi maskeli kapak(aerosol chamber) çıkartılır.
- _ Cihazın içinde kristal bulunan havuz bölümü bir miktar distile su ile doldurulur. Cihaz bu bölüme su konulmadan çalıştırılmamalıdır.
- _ Cihazla birlikte ilaçların konulacağı küçük şeffaf kaplar verilmektedir. İlaç sadece bu kaba koyulur ve içine su koyduğumuz haznenin üzerine uygun bir şekilde yerleştirilir. Bu işlemden sonra mavi maskeli kapak kapatılır. İsteğe bağlı olarak ağızlık veya burunluk parçası da takılabilmektedir.
- _ Cihaz elektrik prizine takıldıktan sonra arkadaki düğmeye basılır ve cihaz çalışmaya başlar. Tedavi sırasında bu düğmeye parmak basılı tutulur.Çalışma düğmesinden parmak çekildiği zaman kapanır.
- _ Tedavi tamamlandıktan sonra ilaç kabı çıkartılıp, haznenin içindeki su mutlaka boşaltılmalıdır.
- _ İlaç kabı yırandığında yenisi ile değiştirilmelidir. Cihazla birlikte yedek ilaç kapları verilmektedir.
- _ Her kullanımdan önce kristalin bulunduğu hazneye su konulduğu kontrol edilmelidir. Kesinlikle susuz çalıştırılmamalıdır.
- _ İlaç kabının yerleştirildiği bölümdeki mavi lastik halkanın 2 (iki) adet yedeği vardır. İhtiyaç duyulduğunda değiştirilebilir.
- _ Tedavi sonrasında cihaz ve cihaz parçaları özel çantasında muhafaza edilmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- * Cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekiniz.
- * Cihazı sadece reçete edilmiş inhalasyon solüsyonları ile kullanınız.
- * Çocukların ve özürhüleriin cihazı kullanımı esnasında yanlarından ayrılmayınız.
- * Elektrik kablosu hasarlı cihazı çalıştırmayınız.
- * Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- * Cihazı suya batırmayınız, yıkamayınız.
- * Cihazı uyurken kullanmayınız.
- * Cihazı elleriniz ıslakken çalıştırmayınız.
- * Banyo veya duş alırken cihazı kullanmayınız.
- * Cihazı temizlerken fişini prizden çekmeyi unutmayınız.
- * Tedaviniz sonrası ilaç haznesi içinde ilaç bırakmayınız.
- * Cihazı ve cihazın aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.
- * Esansiyel yağlar kullanmayın, yağlı ilaçlar ve maddeler plastik aksesuarlara zarar verebilir.
- * Satıcı tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız.
- * Cihazla oksijen veya nitro oksit ile temas ettiğinde alevlenecek anestetik karışımlar kullanmayınız.
- * Herhangi bir arıza veya çalışmama durumunda
 - Fişini çekiniz ve kurcalamayınız.
 - Yetkili servis tarafından onarılmalıdır.
- * Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, çocuklar için tehlikeli olacak küçük parçalarını dışarıda bırakmamaya özen gösteriniz.
- * Cihazı önerilen şekilde kullanınız. Yanlış kullanmaya bağlı insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan üretici ve satıcı firma sorumlu tutulamaz.
- * Cihazı ve cihazın aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.

UYARILAR

- * Tedavinizin aksamaması açısından elektrik kesintisi veya arıza ihtimaline karşılık doktorunuz tarafından önerilen başka bir alternatif ilaç veya aletin bulundurulmasını öneririz.
- * Tedavinizin doktorunuz tarafından önerilmesi gereklidir.
- * Üretici ve satıcı firma cihaz ve aksesuarların uygun olmayan yanlış kullanımından doğan hasarlardan sorumlu değildir.

GARANTİ KOŞULLARI

- * Garanti fabrikasyon veya materyal defektlerinden doğacak arızalarda ve kullanıcı veya yetkili olmayan birisinin müdahale etmediği hallerde geçerlidir.
- * Müşteri nakil ücretini öder.

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır:

- * Aksesuarlar, parçalar ve parçaların zarar görmesi, üreticiye-satıcıya ait olmayan taşıma sırasında cihazın düşmesi,hasar görmesi vb. gibi durumlarda.
- * Bir arıza ortaya çıktığı zaman garanti sertifikası ve fatura ile birlikte yetkili servise yollanmalıdır. Aksi takdirde garanti geçerli olmaz ve tamir ücreti alınır.
- * Tamir için verildiğinde cihazın orijinal setinin değişmemiş olması gerekir. Cihazdaki herhangi bir değişiklik garantiyi geçersiz kılar.

Dikkat : Bu elektromedikal bir alettir ve hijyenik sebeplerden dolayı cihazın değiştirilmesi yasaktır.

Dikkat : Garanti fatura ve garanti belgesi ile birlikte geçerlidir.

FİRMAMIZI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.