

MED2000

AIRBOX
NEBÜLİZATÖR CİHAZI



KULLANIM KILAVUZU

İTHALATÇI FİRMA: NAZ MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZ. VE ÜR. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.


ADRES: SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. BAYRAK APT. NO:146/6
KADIKÖY/İSTANBUL

TEL:0216 336 94 72 FAX:0216 345 52 67

naz@nazmedikal.com.tr www.nazmedikal.com.tr

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ

Cihazın Parça ve Aksesuar Listesi

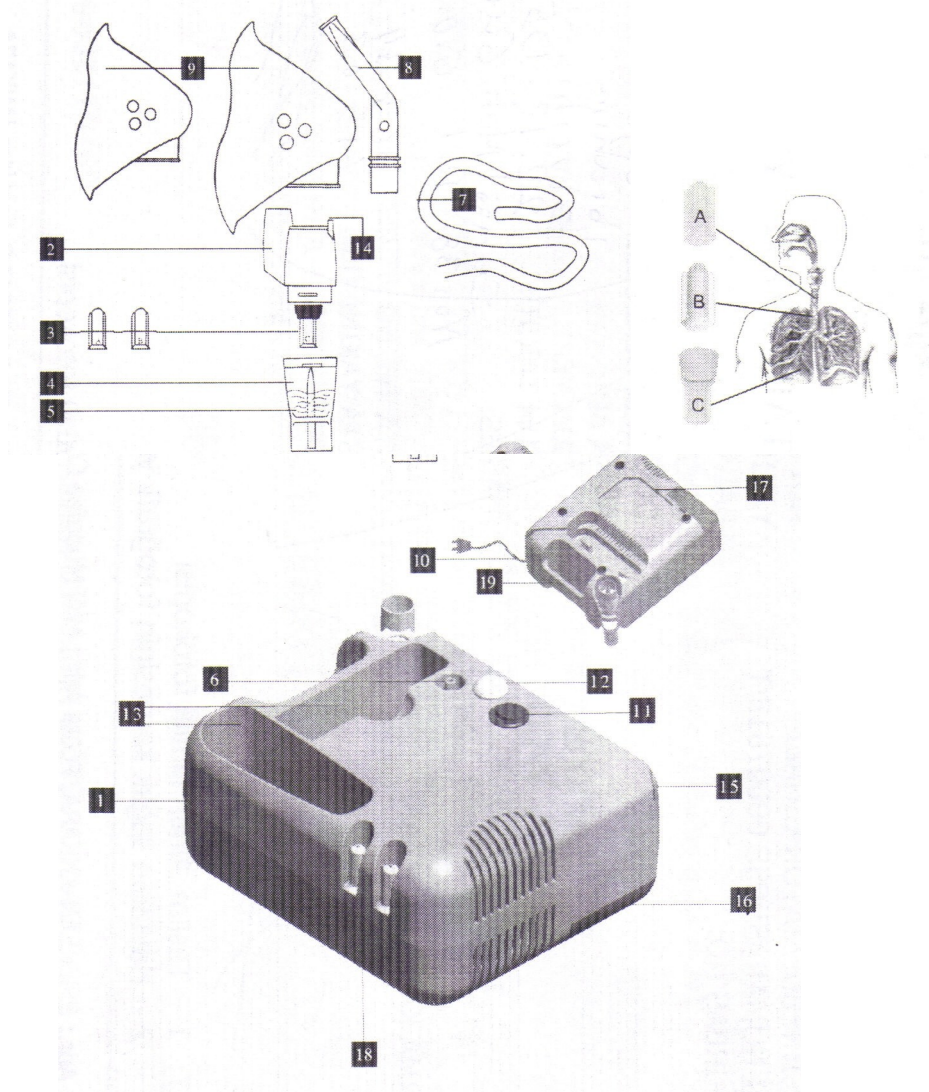

1. Cihaz
2. İlaç haznesi üst parçası
3. Pisper A – B – C
4. İlaç haznesi alt parçası
5. İlaç (Aerosol Solüsyon)
6. Hava çıkış parçası
7. Bağlantı hortumu
8. Ağızlık parçası
9. Maske (Yetişkin-Pediatrik)
10. Elektrik bağlantı kablosu
11. Açma – Kapama düğmesi
12. Filtre yuvası kapağı
13. Aksesuar kabini
14. Akım düzenleyici valf
15. İlaç haznesi tutucu
16. Kasa
17. El tutma yeri
18. Pisper kabini
19. Taşıma Kulbu

Teknik Özellikler

Maksimum İlaç Haznesi Kapasitesi	Maksimum Basınç	Maksimum Akım	Gürültü Düzeyi	Kullanım Süresi	Voltaj	Ağırlık	Boyutlar cm.
6 ml.	2 bar	14 lt./dk.	40 dB 50 (cm. uzaklıktan)	30 dk. açık 30 dk. kapalı	230 V 50 Hz	1,7 kg.	22 uzunluk 11,6 yükseklik 18,2 genişlik

- * Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- * Cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekiniz.
- * Cihazı sadece reçete edilmiş inhalasyon solüsyonları ile kullanınız.
- * Çocukların ve özürülülerin cihazı kullanımı esnasında yanlarından ayrılmayınız.
- * Elektrik kablosu hasarlı cihazı çalıştırmayınız.
- * Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- * Cihazın hava giriş ve çıkış bölümlerini kapatmayınız.
- * Cihazı suya batırmayınız, yıkamayınız.
- * Cihazı uyurken kullanmayınız.
- * Cihazı sert bir zemin üzerinde çalıştırınız.
- * Cihazı elleriniz ıslakken çalıştırmayınız.
- * Eğer cihazın filtresi ıslanırsa yenisiyle değiştiriniz.
- * Banyo veya duş alırken cihazı kullanmayınız.
- * Cihazı temizlerken fişini prizden çekmeyi unutmayınız.
- * Enfeksiyon ve mikrop bulaşma riskine karşı aksesuarların kişisel kullanımı tavsiye edilir. Kullanım sıklığına bağlı olarak aksesuarları değiştiriniz.
- * Tedaviniz sonrası ilaç haznesi içinde ilaç bırakmayınız.
- * Cihazı ve cihazın aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.
- * Esansiyel yağlar kullanmayın, yağlı ilaçlar ve maddeler plastik aksesuarlara zarar verebilir.
- * Satıcı tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız.
- * Cihazla oksijen veya nitro oksit ile temas ettiğinde alevlenecek anestezi karışımlar kullanmayınız.
- * Herhangi bir arıza veya çalışmama durumunda
 - Fişini çekiniz ve kurcalamayınız.
 - Yetkili servis tarafından onarılmalıdır.
- * Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, çocuklar için tehlikeli olacak küçük parçalarını dışarıda bırakmamaya özen gösteriniz.
- * Cihazı önerilen şekilde kullanınız. Yanlış kullanmaya bağlı insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan üretici ve satıcı firma sorumlu tutulamaz.
- * Cihazı ve cihazın aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.

UYARILAR


- * Tedavinizin aksamaması açısından elektrik kesintisi veya arıza ihtimaline karşılık doktorunuz tarafından önerilen başka bir alternatif ilaç veya aletin bulundurulmasını öneririz.
- * Tedavinizin doktorunuz tarafından önerilmesi gereklidir.
- * Cihaz sürekli max. 30 dk. çalışma kapasitesine sahiptir.Bu süreden sonra cihaz 30 dk. kapatılarak dinlendirilmelidir.
- * Cihazın ortalama hızı aynı kaldığı için motor hızındaki dalgalanmalar tolere edilebilir.
- * Üretici ve Satıcı firma sadece aşağıdaki durumlardan dolayı kendilerini sorumlu tutarlar:
 - Cihazın test ve tamir, bakım işlemleri yetkili personel tarafından yapılmışsa,
 - Cihazın kullanıldığı yerdeki elektrik sistemi yürürlükteki sistemle uyumluysa,
 - Bakım ve kullanım talimatlarına uyulduysa,
- * Üretici ve satıcı firma cihaz ve aksesuarların uygun olmayan yanlış kullanımından doğan hasarlardan sorumlu değildir.

KULLANMA VE TEMİZLEME TALİMATLARI

KULLANIM

- * Cihazın fişini prize takınız. Voltajının uyumlu olmasına dikkat ediniz.
- * Doktorunuzun önerdiği ilacı, ilaç haznesinin alt parçasına önerilen miktarda koyunuz.
- * İlaç haznesinin üst parçasını, alt parçaya takınız.
- * İlaç haznesine maske veya ağızlığı yerleştiriniz.
- * Bağlantı hortumunun bir ucunu ilaç haznesinin altına, diğer ucunu da birleştiriciye bağlayarak cihaza takınız.
- * Açma – kapama düğmesini "on" konumuna getiriniz.
- * Kapatmak içinse "off" konumuna getiriniz.
- * Tedaviden iyi sonuç almak için dik bir pozisyonda oturunuz. Eğer maske ile kullanıyorsanız yüzünüze iyice yerleştiriniz. Her solunum hareketinin sonunda biraz duracak şekilde yavaşça soluk alarak hızlıca soluk veriniz.

- * Eđer ađızlık parçası kullanıyorsanız dişlerinizin arasında tutarak dudaklarınızı kapayın ve ađızınızdan soluk alınız.
- * Alt solunum yollarındaki problemler için ađızlık parçası kullanarak tedavi yapmak yararlıdır.
- * Tedavi esnasında dinlenmek gerekli ise nebulizatörü kapatınız.
- * Eđer cihaz aralıklı olarak aerosol veriyorsa tedaviyi sonlandırınız.
- * Uygulamanın sonunda aksesuarları tarif edildiđi gibi iyice yıkayın ve steril ediniz.
- * Uygulamanın sonunda cihaz kullanılmıyacaksa fişini çekiniz.

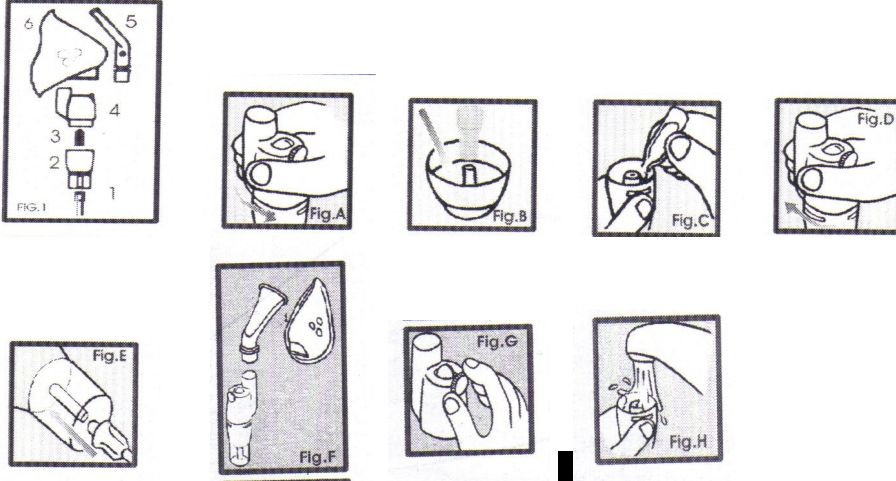

TEMİZLİK

- * Fişini çekiniz. Cihazı ve aksesuarlarını her uygulamadan sonra temizleyiniz.
- * Temizlik için nebulizatör ile birlikte verilen el kitabını inceleyiniz.
- Önemli Uyarı : maske ve bağlantı hortumu kaynar suya konulmamalıdır.
- * Temizlik için özel kimyasal dezenfektanlar kullanılabilir.
- * Benzen, alkol gibi volatil sıvıları kullanmayınız.
- * Bütün parçaları temizledikten sonra dikkatlice kurulayınız.

BAKIM

- * Eđer cihaz sık kullanılıyorsa hava filtresi yılda bir deđiştirilebilir.
- * Filtreyi deđiştirmek için filtre kapađını açınız.
- * Eski filtreyi çıkarıp yerine yenisini yerleřtiriniz ve filtre kapađını tekrar kapatınız.
- * Cihaz içinde 3 A güvenlik sigortası vardır.Bu sigortanın deđiştirilmesi bütün diđer tamir işlemlerinde olduđu gibi yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

GARANTİ KOŞULLARI

- * Garanti fabrikasyon veya materyal defektlerinden dođacak arızalarda ve kullanıcı veya yetkili olmayan birisinin müdahale etmediđi hallerde geçerlidir.
 - * Müşteri nakil ücretini öder.
 - Aşađıdakiler garanti kapsamı dıřındadır:**
 - * Aksesuarlar, parçalar ve parçaların zarar görmesi, üreticiye-satıcıya ait olmayan taşıma sırasında cihazın düşmesi,hasar görmesi vb. gibi durumlarda.
 - * Bir arıza ortaya çıktığı zaman garanti sertifikası ve fatura ile birlikte yetkili servise yollanmalıdır. Aksi takdirde garanti geçerli olmaz ve tamir ücreti alınır.
 - * Tamir için verildiđinde cihazın orijinal setinin deđişmemiş olması gerekir.
- Cihazdaki herhangi bir deđişiklik garantiyi geçersiz kılar.

Dikkat : Bu elektromedikal bir alettir ve hijyenik sebeplerden dolayı cihazın deđiştirilmesi yasaktır.

Dikkat : Garanti fatura ve garanti belgesi ile birlikte geçerlidir.

FİRMAMIZI TERCİH ETTİĐİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.