

MED2000

CİCOBOY

ALLEGRO

BLUEDREAM

NEBÜLİZATÖR CİHAZI

KULLANIM KILAVUZU

İTHALATÇI FİRMA:NAZ MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZ. VE ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. BAYRAK APT. NO:146/6 KADIKÖY/İSTANBUL


TEL:0216 336 94 72

FAX:0216 345 52 67

naz@nazmedikal.com.tr

www.nazmedikal.com.tr

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ

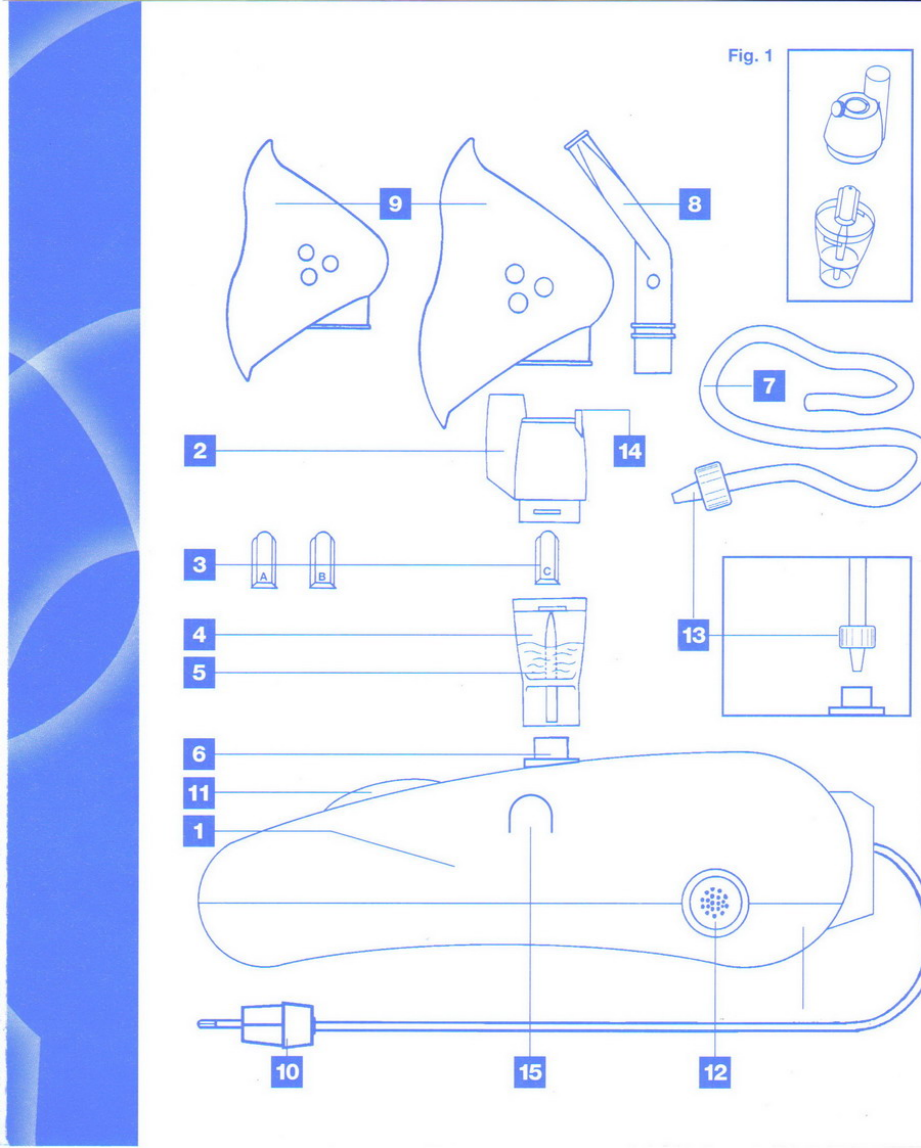

Cihazın Parça ve Aksesuar Listesi

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Cihaz | 9. Maske (Yetişkin-Pediatric) |
| 2. İlaç haznesi üst parçası | 10. Elektrik bağlantı kablosu |
| 3. Pisper A – B – C | 11. Açma – Kapama düğmesi |
| 4. İlaç haznesi alt parçası | 12. Filtre yuvası kapağı |
| 5. İlaç (Aerosol Solüsyon) | 13. Cihaz-bağlantı hortumu |
| 6. Lastik bağlantı | birleştirici parça |
| 7. Bağlantı hortumu | 14. Akım düzenleyici valf |
| 8. Ağızlık parçası | 15. İlaç haznesi tutucu |

Teknik Özellikler

Maksimum İlaç Haznesi Kapasitesi	Maksimum Basınç	Maksimum Akım	Gürültü Düzeyi	Kullanım Süresi	Voltaj	Ağırlık	Boyutlar cm.
7 ml.	2,4 bar	17 lt./dk.	54 dB 50 (cm. uzaklıktan)	30 dk. açık 30 dk. kapalı	230 V 50 Hz	1,5 kg.	23 uzunluk 12 yükseklik 19 genişlik

- * Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- * Cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekiniz.
- * Cihazı sadece reçete edilmiş inhalasyon solüsyonları ile kullanınız.
- * Çocukların ve özürülülerin cihazı kullanımı esnasında yanlarından ayrılmayınız.
- * Elektrik kablosu hasarlı cihazı çalıştırmayınız.
- * Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- * Cihazın hava giriş ve çıkış bölümlerini kapatmayınız.
- * Cihazı suya batırmayınız, yıkamayınız.
- * Cihazı uyurken kullanmayınız.
- * Cihazı sert bir zemin üzerinde çalıştırınız.
- * Cihazı elleriniz ıslakken çalıştırmayınız.
- * Eğer cihazın filtresi ıslanırsa yenisiyle değiştiriniz.
- * Banyo veya duş alırken cihazı kullanmayınız.
- * Cihazı temizlerken fişini prizden çekmeyi unutmayınız.
- * Enfeksiyon ve mikrop bulaşma riskine karşı aksesuarların kişisel kullanımı tavsiye edilir. Kullanım sıklığına bağlı olarak aksesuarları değiştiriniz.
- * Tedaviniz sonrası ilaç haznesi içinde ilaç bırakmayınız.
- * Cihazı ve cihazın aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.
- * Esansiyel yağlar kullanmayın, yağlı ilaçlar ve maddeler plastik aksesuarlara zarar verebilir.
- * Satıcı tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız.
- * Cihazla oksijen veya nitro oksit ile temas ettiğinde alevlenecek anesteziik karışımlar kullanmayınız.
- * Herhangi bir arıza veya çalışmama durumunda
 - Fişini çekiniz ve kurcalamayınız.
 - Yetkili servis tarafından onarılmalıdır.
- * Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, çocuklar için tehlikeli olacak küçük parçalarını dışarıda bırakmamaya özen gösteriniz.
- * Cihazı önerilen şekilde kullanınız. Yanlış kullanmaya bağlı insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan üretici ve satıcı firma sorumlu tutulamaz.
- * Cihazı ve cihazın aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.

UYARILAR

- * Tedavinizin aksamaması açısından elektrik kesintisi veya arıza ihtimaline karşılık doktorunuz tarafından önerilen başka bir alternatif ilaç veya aletin bulundurulmasını öneririz.
- * Tedavinizin doktorunuz tarafından önerilmesi gereklidir.
- * Cihaz sürekli max. 30 dk. çalışma kapasitesine sahiptir.
Bu süreden sonra cihaz 30 dk. kapatılarak dinlendirilmelidir.
- * Cihazın ortalama hızı aynı kaldığı için motor hızındaki dalgalanmalar tolereedilebilir.
- * Üretici ve Satıcı firma sadece aşağıdaki durumlardan dolayı kendilerini sorumlu tutarlar:
 - Cihazın test ve tamir, bakım işlemleri yetkili personel tarafından yapılmışsa,
 - Cihazın kullanıldığı yerdeki elektrik sistemi yürürlükteki sistemle uyumluysa,
 - Bakım ve kullanım talimatlarına uyulduysa,
- * Üretici ve satıcı firma cihaz ve aksesuarların uygun olmayan yanlış kullanımından doğan hasarlardan sorumlu değildir.

KULLANMA VE TEMİZLEME TALİMATLARI

KULLANIM

- * Cihazın fişini prize takınız. Voltajının uyumlu olmasına dikkat ediniz.
- * Doktorunuzun önerdiği ilacı, ilaç haznesinin alt parçasına önerilen miktarda koyunuz.
- * İlaç haznesinin üst parçasını, alt parçaya takınız.
- * İlaç haznesine maske veya ağızlığı yerleştiriniz.
- * Bağlantı hortumunun bir ucunu ilaç haznesinin altına, diğer ucunu da birleştiriciye bağlayarak cihaza takınız.
- * Açma – kapama düğmesini “on” konumuna getiriniz.
- * Kapatmak içinse “off” konumuna getiriniz.
- * Tedaviden iyi sonuç almak için dik bir pozisyonda oturunuz. Eğer maske ile kullanıyorsanız yüzünüze iyice yerleştiriniz. Her solunum hareketinin sonunda biraz duracak şekilde yavaşça soluk alarak hızlıca soluk veriniz.
- * Eğer ağızlık parçası kullanıyorsanız dişlerinizin arasında tutarak dudaklarınızı kapayın ve ağızınızdan soluk alınız.
- * Alt solunum yollarındaki problemler için ağızlık parçası kullanarak tedavi yapmak yararlıdır.
- * Tedavi esnasında dinlenmek gerekli ise nebülizatörü kapatınız.
- * Eğer cihaz aralıklı olarak aerosol veriyorsa tedaviyi sonlandırınız.
- * Uygulamanın sonunda aksesuarları tarif edildiği gibi iyice yıkayın ve steril ediniz.
- * Uygulamanın sonunda cihaz kullanılmayacaksa fişini çekiniz.

TEMİZLİK

- * Fişini çekiniz. Cihazı ve aksesuarlarını her uygulamadan sonra temizleyiniz.
- * Temizlik için nebülizatör ile birlikte verilen el kitabını inceleyiniz.
Önemli Uyarı : maske ve bağlantı hortumu kaynar suya konulmamalıdır.
- * Temizlik için özel kimyasal dezenfektanlar kullanılabilir.
- * Benzen, alkol gibi volatil sıvıları kullanmayınız.
- * Bütün parçaları temizledikten sonra dikkatlice kurulayınız.

BAKIM

- * Eğer cihaz sık kullanılıyorsa hava filtresi yılda bir değiştirilebilir.
- * Filtreyi değiştirmek için filtre kapağını açınız.
- * Eski filtreyi çıkarıp yerine yenisini yerleştiriniz ve filtre kapağını tekrar kapatınız.
- * Cihaz içinde 3 A güvenlik sigortası vardır.Bu sigortanın değiştirilmesi bütün diğer tamir işlemlerinde olduğu gibi yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

GARANTİ KOŞULLARI

- * Garanti fabrikasyon veya materyal defektlerinden doğacak arızalarda ve kullanıcı veya yetkili olmayan birisinin müdahale etmediği hallerde geçerlidir.
- * Müşteri nakil ücretini öder.

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır:

- * Aksesuarlar, parçalar ve parçaların zarar görmesi, üreticiye-satıcıya ait olmayan taşıma sırasında cihazın düşmesi,hasar görmesi vb. gibi durumlarda.
- * Bir arıza ortaya çıktığı zaman garanti sertifikası ve fatura ile birlikte yetkili servise yollanmalıdır. Aksi takdirde garanti geçerli olmaz ve tamir ücreti alınır.
- * Tamir için verildiğinde cihazın orijinal setinin değişmemiş olması gerekir. Cihazdaki herhangi bir değişiklik garantiyi geçersiz kılar.

Dikkat : Bu elektromedikal bir alettir ve hijyenik sebeplerden dolayı cihazın değiştirilmesi yasaktır.

Dikkat : Garanti fatura ve garanti belgesi ile birlikte geçerlidir.

FİRMAMIZI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.