




NazStar

**BURUN YIKAMA CİHAZI**  
**Taşınabilir & Şarj Edilebilir**

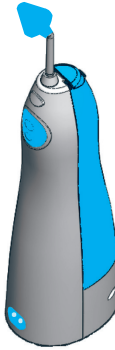

Model NB-500



**Kullanım Kılavuzunu Okumadan Ürünü Çalıştırmayınız.**

**Sağlıklı Günler Dileriz.**



NazStar Burun Yıkama Cihazını tercih ettiğiniz için tebrikler...

NazStar Burun Yıkama Cihazı, hem taşınabilir hem de şarj edilebilir özelliktedir. Kullanımı kolay ve pratiktir. NazStar Burun Yıkama Cihazı, burun içindeki silyaların hareketini, aktivasyonunu ve sinüslerin temizlenmesini sağlar. Sinüslerin temizlenmesi ve nemlenmesi soluk almayı rahat ve kolay hale getiren doğal bir yöntemdir.


NazStar Burun Yıkama Cihazını lütfen doktorunuzun önerdiği şekilde ve sıklıkta kullanınız.

NazStar Burun Yıkama Cihazı kullanarak daha rahat soluk almanın deneyimini ve keyfini yaşadığınız sağlıklı günler dileriz.

## **Dikkat!**

- Elektrikli cihazları kullanırken yangın, elektrik şoku ve/veya insanların yaralanması gibi riskleri önlemek için temel güvenlik kurallarına dikkat etmek gerekir.
- Cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
  - Çocukların ve özel bakım ihtiyacı olan kişilerin cihazı kullanımı sırasında bir ebeveyn yardımı ve/veya gözlemi ile uygulama yapmaları sağlanmalıdır.
  - Eğer nazal pasajınız tamamen kapalıysa cihazı kullanmayınız.
  - Kulağınızda bir basınç hissediyorsanız veya kulak enfeksiyonunuz varsa cihazı kullanmayınız.
  - Yetkili distribütörünüz tarafından önerilen veya satılan parçaları kullanınız.
  - Cihazı su veya diğer sıvılar içine koymayınız. Cihazı içine düşebileceği, devrilebileceği herhangi bir sıvı veya su yanına koymayınız. Şarj ünitesini ıslak ellerle tutmayınız.
  - Cihazı hasar görmüş bir prizde kullanmayınız. Cihazın şarj ünitesi kordon veya fişi herhangi bir hasar görürse kullanmayınız.
  - Cihazı herhangi bir elektrikli ısıtıcı, ocak vb. gibi yanına koymayınız.
  - Cihazı sadece önerilen kullanım alanı için kullanınız. Dilaltı, kulak vb. gibi hasar oluşabilecek bölgeler için kesinlikle kullanmayınız.
  - Nazal pasajınız tam olarak kapalı veya kulak enfeksiyonunuz varsa ya da kulakta basınç hissediyorsanız nazal yıkamayı kesin ve doktorunuza danışınız.
  - Lütfen cihazı kullanım kılavuzundaki talimatlara uyarak kullanınız.

## ÜRÜNÜN TANITILMASI

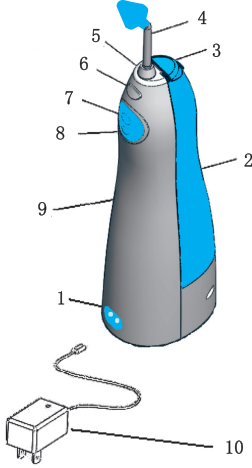


- 1-Şarj Girişi
- 2-Su Haznesi
- 3-Su Haznesi Kapağı
- 4-Yıkama Ucu
- 5-Yıkama Ucu Yuvası
- 6-Yıkama Ucu Çıkarma Düğmesi
- 7-Kapama Düğmesi
- 8-Açma Düğmesi
- 9-Cihaz Gövdesi
- 10-Şarj cihazı

## KULLANMAYA BAŞLARKEN

- 1)Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
- 2)İlk kullanımdan önce cihazı 16 saat şarj ediniz.  
DİKKAT! Şarj etmeden önce cihazın kapalı olması gerekmektedir. (Şekil-1) Şarj cihazı üniteye bağlanıp prize takıldığında şarj cihazının üzerindeki LED gösterge yanar. (Şekil-2)




Şekil-1

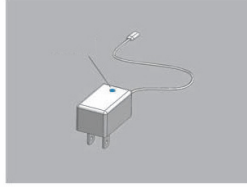

Şekil-2

- 3)Su haznesi kapağını açınız ve su haznesi içine tuzlu su koyunuz. (Şekil-3)

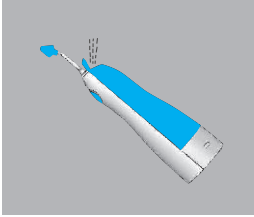

Şekil-3




Şekil-4


- 4)Tercih ettiğiniz burun yıkama aparatını (pulse veya sprey) cihazın üst tarafında bulunan yuvaya dikkatlice yerleştiriniz. (Şekil-4) Not: Cihazla birlikte pulse ve sprey olmak üzere iki ayrı tip yıkama ucu verilmektedir.

## UYGULAMA

- 5) Cihazın üst kısmı yukarı gelecek şekilde, cihazı açıp kapatarak su akışını kontrol ediniz. (Şekil-5)
- 6) Nazal yıkama ucunu burun deliğinize yakın tutunuz. (Şekil-6) Ağızınızı hafif açık tutarak cihazı açınız. Tuzlu suyun burnunuzun bir deliğinden girip nazal pasajınızdan geçerek diğer deliğinden boşalmasını takiben yumuşak bir şekilde sümkürerek mukus, bakteri ve suyun kalan kısmının çıkmasını sağlayınız. (Şekil-7)
- 7) Diğer burun deliğinize de aynı şekilde uygulama yapınız.

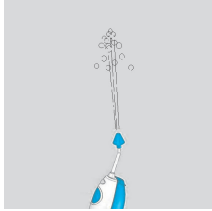

Şekil-5

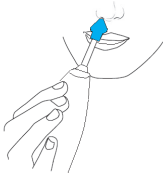

Şekil-6




Şekil-7


## KULLANIM VE UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDECEĞİNİZ NOKTALAR

-Uygulamadan iyi sonuç almak için, su akışının en iyi olacağı şekilde, cihazın burun yıkama ucu yukarıya bakacak şekilde tutunuz. (Şekil-8)

-Uygun nazal yıkama ucunu seçtikten sonra, nazal yıkama ucunu yuvasına iyice yerleştirdiğinizden emin olunuz. (Şekil-9)

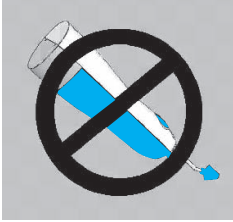


Şekil-8

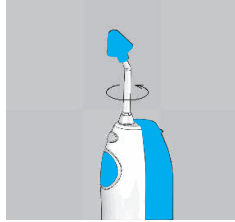


Şekil-9

-Tedaviniz bittiğinde cihazı kapatınız. Su haznesinde kalan su varsa boşaltınız. (Şekil-10)

-Eğer burun yıkama aparatını değiştirmek istiyorsanız ucu çıkarma düğmesine basınız. (Şekil-11) Yenisini takmak için 4. maddeyi tekrar okuyup uygulayınız.

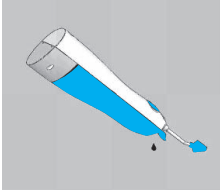

Şekil-10

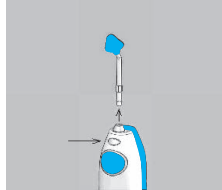

Şekil-11



## **TEMİZLEME VE BAKIM**

### **Temizlik**

- 1-Cihazın elektrięe takılı olmadığından emin olunuz.
- 2-Cihazın dıř yüzeyini yumuřak nemli bir bezle siliniz.
- 3-Cihaza zarar verebilecek temizleyici maddeler kullanmayınız.
- 4-Cihazı hiçbir zaman direkt su altında yıkamayınız, suya batırmayınız.
- 5-Su haznesi bölümü çıkarılabilir deęildir. Su haznesini temizlemek istiyorsanız kapaęını açınız ve hazneye birkaç kez arka arkaya su doldurup boşaltarak temizleme yapınız.
- 6-Sert su nedeniyle kalan mineral parçaları veya önerilmeyen sıvıların kullanımı halinde cihaz tıkanabilir. Lütfen sadece temiz su kullanınız.

### **CİHAZI ISLATMAYINIZ VEYA SUYA BATIRMAYINIZ.**

### **Bakım**

Bu cihazın kullanıcı tarafından deęiřtirilecek veya bakımı yapılacak bir kısmı yoktur.İhtiyaç halinde yetkili satıcınıza başvurunuz. Cihazda řarj edilebilir Nikel Metal Hibrid pil kullanılmaktadır. řarj edilebilir pil kullanımı çöpe atılan pil sayısını azaltmaktadır.

## SORUN GİDERME

<b>Problem</b>	<b>Olası Sebep</b>	<b>Çözüm</b>
Cihaz çalışmıyor.	Pilin gücü yoktur.	Cihazı kapatın. Cihazı 16 saat şarj edin. LED ışığın yanması bağlantının başarılı olduğunu gösterir.
Su, uç ve uç yıkama yuvasının arasından sızıyor.	Uç yuvaya tam oturmamıştır.	Ucun yuvaya tam oturduğundan emin olun.
Su akışı yok, su gelmiyor.	Cihazın ucu aşağıda	Cihazın ucunu yukarıya getirin.
	Su haznesinde su yok.	Su haznesine su koyun.
	Akım yolu tıkanmıştır.	Su haznesini temiz su ile doldurun.1 kaşık(10 ml.) sirke ekleyin. Su haznesindeki su boşalınca kadar cihazı çalıştırın. Boşaldıktan sonra su ile doldurup tekrar çalıştırın.

## **GARANTİ KOŞULLARI**

- 1)İmalat hatalarına karşı garanti verilmekle birlikte satıcı firmanın yükümlülüğü ürünün satış fiyatını geçemez.  
(Kişisel yanlış kullanım ve belirli periyotlarda değişmesi gereken şarj edilebilir piller garanti dışıdır.)
- 2)Kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalar garanti dışıdır.
- 3)Garanti süresi haricinde bozulan cihazlar için parça ve servis ücreti müşteriye aittir.
- 4)Ürün gerekli standartları karşılayacak şekilde dizayn ve imal edilmiştir.
- 5)Satış sonrası servis telefonu: 0216 3369472
- 6)Garantinin geçerli olabilmesi için, satış tarihini belgelemek adına lütfen fatura veya satış fişi ve garanti belgenizi saklayınız.
- 7)Garanti süresince ve garanti sonrası ürünün teknik servisimize ulaştırılması ile ilgili masraflar kullanıcıya aittir.

**İthalatçı Firma**

**Naz Medikal Özel Sađ. Hiz. ve Ür. San. Tic. Ltd. Şti**  
**Söđütlüçeşme Cad. Bayrak Apt. No:146/6**  
**Kadıköy/İstanbul**

**Tel:0216 414 36 30**

**Faks:0216 345 52 67**

**[naz@nazmedikal.com.tr](mailto:naz@nazmedikal.com.tr)**

**[www.nazmedikal.com.tr](http://www.nazmedikal.com.tr)**

**NazStar Burun Yıkama Cihazını tercih ettiđiniz için  
teşekkür ederiz.**