

TAŞINABİLİR OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

OLV-B1



İthalatçı Firma

Naz Medikal Özel Sağlık Hiz. ve Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Söğütlüçeşme Cad. Bayrak Apt. No: 146/6 Kadıköy/İstanbul

Tel: 0216 414 36 30

Faks: 0216 345 52 67

naz@nazmedikal.com.tr

www.nazmedikal.com.tr

OLV-B1 Taşınabilir Oksijen Konsantratör Cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

LÜTFEN CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUNUZ.

İÇERİK

Kullanım Kılavuzu Hakkında.....	-1-
Tanıtım.....	-1-
Önemli Güvenlik Kuralları.....	-2-
Kullanmaya Başlarken.....	-2-
Şematik Görünüm.....	-3-
Kullanım.....	-3,4-
Temizlik & Bakım.....	-5-
Sorun Giderme.....	-5-
Teknik Özellikler.....	-6-
Garanti.....	-6-

Kullanım Kılavuzu Hakkında

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. OLV-B1 Taşınabilir Oksijen Konsantratör Cihazının doğru kullanımını sağlamak için aşağıdaki noktaları dikkatlice okuyun ve onlara uyun. Bu kılavuzu okuduktan sonra aklınıza gelebilecek sorulara cevap bulabilmek için güvenli bir yerde saklayın.

Cihazın sökülmesi, ek yapılması, değişiklik ve tamiri sadece üretici ve/veya distribütör tarafından yetkilendirilmiş kişilerce yapılmalıdır. Cihaz ile birlikte kullanılan diğer elektrik aksesuarları CE standartlarına uygun olmalıdır. OLV-B1 Taşınabilir Oksijen Konsantratör Cihazı, kullanım kılavuzu eşliğinde kullanılmalıdır.

Tanıtım

OLV-B1 Taşınabilir Oksijen Konsantratörünü, evinizde kullanabileceğiniz gibi her yere götürebilirsiniz, arabanızda kullanabilirsiniz, omzunuza çanta şeklinde rahatlıkla takar, tekerlekli taşıma arabası sayesinde kolayca taşırsınız. Oksijen akım ayarını 1-5 L/dak aralığında doktorunuzun tavsiyesine göre kolayca ayarlayabilirsiniz.

Günümüzde birçok insan solunum ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. Bu tip şikayetleri olan hastaların büyük bir çoğunluğu, evinde ya da hastanede solunum cihazlarını kullanmaktadır. Oksijen konsantratörü 1970'li yılların ortalarında üretilmiş ve günümüzde yaygın olarak kullanılan bir cihaz olmuştur. Evlerde kullanılan geleneksel oksijen konsantratörleri hacmi, ağırlığı, güç kaynağı vb. gibi nedenlerle hastanın mobilize olmasına olanak vermez. Hasta bunları hareket halindeyken, seyahatleyken, veya dışarıdayken oksijen almak için yanında taşıyamaz. Bu nedenle ancak oksijen tüpleri, oksijen torbaları veya kimyasal oksijen kaynakları kullanabilirler. Ancak bunlar da kullanımı zahmetli olduğu gibi uzun süreli oksijen ihtiyacını karşılayamaz. OLV-B1 Oksijen Konsantratörü, 0,5-5 L/dak akımla oksijen üretir, 3 farklı güç kaynağı ile kullanılmasından dolayı rahatlıkla ev dışında da kullanılabilir. OLV-B1 Oksijen Konsantratörü evde olduğu gibi işyerinde, arabada, yolda, seyahatte sınırlama olmadan daha iyi ve kaliteli bir hayat yaşamak isteyenler için tasarlanmıştır. OLV-B1 Oksijen Konsantratörü aynı zamanda hafif ve sessiz bir portatif oksijen kaynağıdır.

Önemli Güvenlik Kuralları


Tüm elektrikli cihazlarda olduğu gibi kullanırken azami dikkat gösterilmeli, özellikle çocukların bulunduğu ortamlarda çocukların cihaza yaklaşmalarına, kurcalamalarına engel olacak şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Cihazı banyo yaparken kullanmayın. Cihazı su gelecek, ıslanacak şekilde herhangi bir yere bırakmayın. Elektrik kablolarını hasar almaktan koruyun, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Hasarlı kablosu olan cihazı çalıştırmayın. Cihaz fişini taktığınız prizin sağlam olup olmadığını kontrol edin, yuvasından çıkmış prizle kullanmayın. Uzatma kablosu kullanmayın. Cihazı kullanırken sigara içmeyin ve yanında sigara içirmeyin.

Kullanmaya Başlarken

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce kutu içeriğinde bulunması gereken aşağıdaki parçaların olup olmadığını kontrol ediniz. Kutu içeriği, size gönderilirken ve/veya teslim edilmeden önce özenle birkaç aşamalı kontrolden geçmektedir.

A-Cihaz B-Kanül Başlığı C-Kanül D-Hava Giriş Filtresi

E-Orijinal Kullanım Kılavuzu F-Türkçe Kullanım Kılavuzu

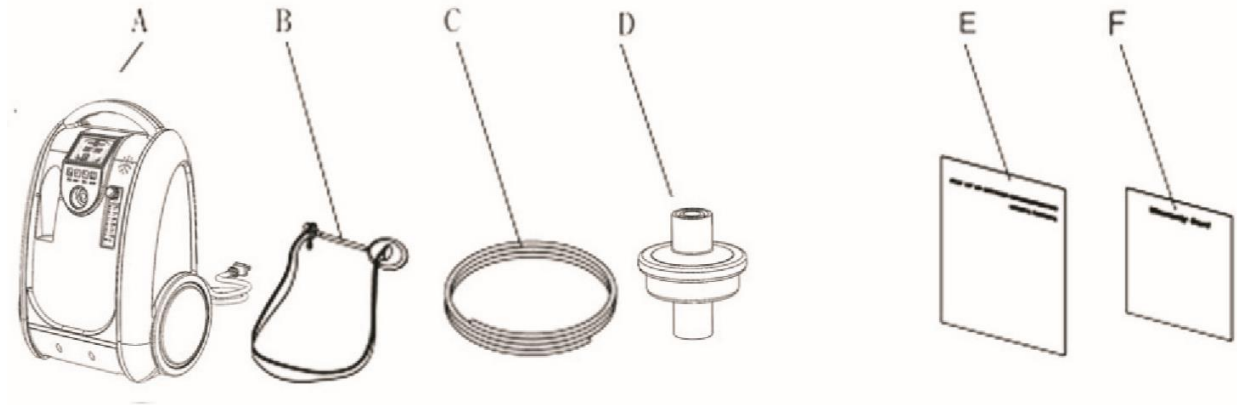


Cihazınızın satın alma faturasını veya fatura fotokopisini saklayın.

Elinizin altında gerektiğinde değiştirmek üzere her zaman yedek hava giriş filtresi bulundurmanızı öneririz.

Şematik Görünüm

- 1-Açma-Kapama Düğmesi 2&3-Zaman Ayarı Tuşları
4-Hava Temizleme (Anion=İyonizer) Özellik Açma Kapama Tuşu 5-LCD Ekran
6-Flow Metre Ayar Düğmesi 7-Flow Metre 8-Nemlendirici Yuvası 9-Oksijen Çıkışı
10-Güç Kablosu 11-Hava Girişi Bölümü Kapağı 12-Hava Giriş Filtresi

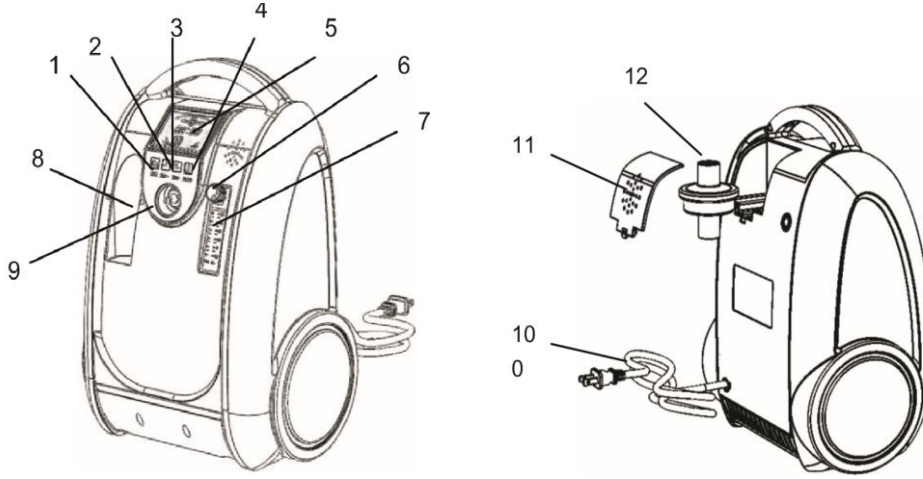


Kullanım

- 1-Cihazınızı mümkün olduğunca temiz ve tozsuz bir ortamda kullanmaya özen gösterin.
- 2-Cihazınızı düzgün bir zemine ve etrafı hava giriş çıkışını engellemeyecek şekilde yerleştirin.
- 3-Fişini elektrik prizine takın.

Dikkat: Cihazınızı soğuk bir ortamdan daha sıcak bir ortama (veya tam tersi de olabilir) taşıdıysanız lütfen çalıştırmadan önce cihazınızın bulunduğu ortamın sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.


- 4-Açma-Kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırın.

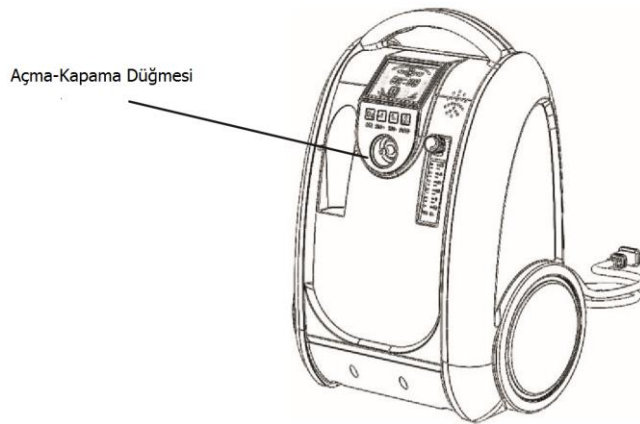


5-Çalışma süresini belirlemek istiyorsanız zaman ayarı tuşlarını kullanmalısınız. Ayarlama yaparken Time set + tuşuna bastığınızda süre artacak, Time set – tuşuna bastığınızda süre azalacak.

6-Eğer hiçbir ayarlama yapmazsanız cihazınız siz kapatıncaya kadar çalışmaya devam edecektir.

7-Hava temizleme özelliğini devreye sokmak istediğinizde Anion tuşuna basın.

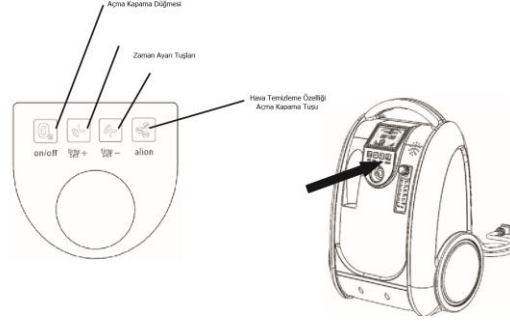

8-Kanülü cihazın ön panelindeki oksijen çıkışına takınız. Kanül başlığını rahat edeceğiniz şekilde ayarlayın.

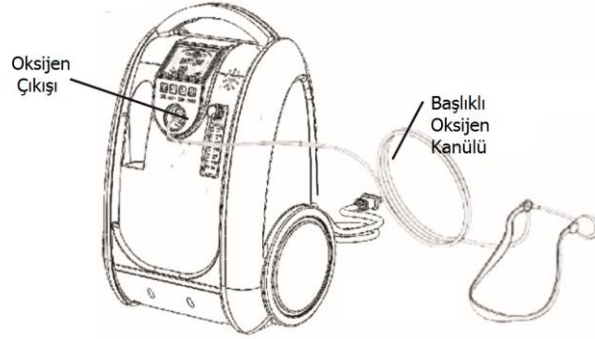

9-Eğer zaman ayarı yaptıysanız cihaz ayarladığınız süre kadar çalıştıktan sonra otomatik olarak duracaktır.

10-İhtiyacınıza göre isterseniz cihazınızı tekrar açabilirsiniz.

11-Cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız lütfen fişini prizden çekin.

12-Cihazınızı araç içinde kullanmak istediğinizde, cihazın elektrik fişini araba çakmak adaptörü üzerindeki yuvaya yerleştirdikten sonra çakmak adaptörünü arabanızdaki çakmak adaptörü yuvasına takın.

13-Batarya ile kullanmak istediğinizde de 12. Maddede olduğu gibi cihazın elektrik fişini araba çakmak adaptörü üzerindeki yuvaya yerleştirdikten sonra çakmak adaptörünü batarya üzerinde bulunan yuvaya takın.

Bataryayı Şarj Etme: Bataryayı evde şarj etmek istediğinizde, batarya şarj edicinin fişini prize diğer ucunu batarya üzerindeki yuvaya takıp şarj edin. İsterseniz araç içinde de bataryayı şarj etmek mümkündür. Batarya ve batarya şarj edici bağlantısını yaptıktan sonra batarya şarj edicinin fişini araba çakmak adaptörü üzerindeki yuvaya yerleştirip çakmak adaptörünü arabanızdaki çakmak adaptörü yuvasına takın. Batarya yaklaşık 4 saat içinde tamamen şarj olacaktır. Li-ion şarj edici üzerindeki ışık şarj olma esnasında kırmızı, kullanım esnasında yeşil renkte yanacaktır.

Temizlik ve Bakım

Cihazınızın temizlik ve bakımını yapacağınız zamanlarda elektrik fişinin çekili olduğundan emin olun. Prizden çekmeden herhangi bir işlem yapmayın.

Cihaz Kabin Temizliği


Cihazın dış yüzeyini ihtiyaç oldukça hav bırakmayan yumuşak bir bezle silerek tozunu alın.

Filtre Değişirme

Elektrik fişinin çekili olduğundan emin olun. Hava giriş bölümü kapağını çıkarın. Eski filtreyi alıp yerine yenisini takın. Ve hava giriş bölümü kapağını tekrar yerleştirin. Filtre değişim süresi cihazı kullanım süresine göre değişebilir.

Bu değişimi maksimum 6 ayda bir mutlaka yapmalısınız.

Cihazın hava giriş filtresi altındaki küçük siyah sünger filtreyi belirli periyotlarda cımbız benzeri bir alet yardımıyla çıkarıp yıkayıp kuruttuktan sonra yuvasına tekrar yerleştirin. Yıprandığında yenisini kullanın. Nemlendirici su kabı ve kanül için de hijyen açısından yine kullanım süresine bağlı olarak belirli sürelerde değişim önerilmektedir.

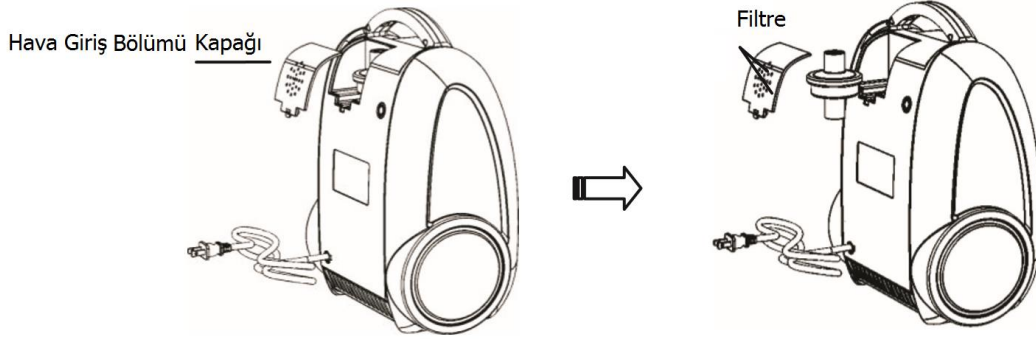

Sorun Giderme

Sorun	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Elektriksel bağlantıları kontrol edin. Duvardaki prize elektrik gelip gelmediğine bakın. Fiş ve elektrik kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin.
Cihaz çalışıyor, oksijen gelmiyor.	Lütfen nemlendirici ve kanül bağlantılarınızı kontrol edin.
Oksijen çok az geliyor.	Kanül vb. gibi parçalarının değişim zamanı gelmiş olabilir. Şehir elektriği voltajınızı kontrol ettirin.
Cihaz alarm veriyor.	Cihazı hava devir-daimini etkilemeyecek bir yere yerleştirin.

Teknik Özellikler

Oksijen Akış Aralığı: 0,5-5 L/dak.

Çalışma Şekli: Sürekli Akım

Oksijen Konsantrasyonu: >90% +3%/-3% (1L/dak.)

Boyutları: 24.5 cm x 18.1 cm x 36.5 cm

Ağırlık: <5 kg

Batarya:<1 kg

Güç Kaynakları: 220 V - 50 Hz

12 V DC

Şarj edilebilir batarya 7800 mAh

Batarya ömrü:>1 saat

Batarya Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat

Elektrik tüketimi: 95 W'dan az

Gürültü seviyesi: 40 dB(A)'den az

Çalıştırma Koşulları

1- Çevre ısısı +10 C ile +35 C arası 2- Relatif nem %30 - %75 arası

Taşıma ve Saklama Koşulları

1- Çevre ısısı -25 C ile +70 C arası 2- Relatif nem %10 - %90 arası

OLV-B1 Taşınabilir Oksijen Konsantratörü Kutu İçeriği

Cihaz, Batarya, Batarya Şarj Edici, Araba Çakmak Adaptörü

Kulaklıklılı Kanül, Hava Giriş Filtresi, 1 ad. Nemlendirici (Bağlantı hortumuyla),

Ayarlanabilir Omuz Askılı Taşıma Çantası, Tekerlekli Taşıma Arabası,

Orijinal Kullanım Kılavuzu, Türkçe Kullanım Kılavuzu

Garanti Koşulları

1)İmalat hatalarına karşı 1 yıl garanti verilmekle birlikte satıcı firmanın yükümlülüğü ürünün satış fiyatını geçemez. (Kişisel yanlış kullanım ve nemlendirici, kanül, filtre, şarj edilebilir piller vb. gibi belirli periyodlarda değişmesi gereken garanti dışıdır.)

2)Kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalar garanti dışıdır.

3)Garanti süresi haricinde bozulan cihazlar için parça ve servis ücreti müşteriye aittir.

4)Ürün gerekli standartları karşılayacak şekilde dizayn ve imal edilmiştir.

5)Satış sonrası servis telefonu: 0216 3369472

6)Garantinin geçerli olabilmesi için, satış tarihini belgelemek adına lütfen fatura veya garanti belgenizi saklayınız.

7)Garanti süresince ve garanti sonrası ürünün teknik servisimize ulaştırılması ile ilgili masraflar kullanıcıya aittir.

İmalatçı Firma:

Zhengzhou Olive Electronic Technology Co.,Ltd

No.79 Zhenghua Road, Zhengzhou, China

Tel: 86 371 86081306 Fax: 86 371 69067368